



medical brain®

PROGRAMA DE MONITORIZACIÓN REMOTA DE PACIENTES (RPM)

BÁSCULA DE PESO GUÍA DE INICIO

Medical Brain se ha asociado con A&D para ofrecerte un excelente báscula de peso que cumple con las directivas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

En esta guía encontrarás:

- 1- Todos los pasos necesarios para enlazar (conectar) esta báscula de peso con la aplicación Medical Brain.
- 2- Cómo tomar mediciones regularmente.



medical brain®

BIENVENIDO,

Tu doctor te ha seleccionado para el Programa de Monitorización Remota de Pacientes (RPM) del Medical Brain con TUS necesidades médicas en mente. Estamos conectados con tu doctor.

Tú y tu salud son nuestra prioridad.

The Medical Brain Team

El programa RPM del Medical Brain te ofrece:



Una báscula de peso seleccionada para ti por tu doctor.



La aplicación Medical Brain. Tu asistente de salud que analiza tu información clínica y signos vitales para identificar factores de riesgo y facilitar una rápida intervención y tratamiento por parte de tu doctor.



El equipo del Medical Brain a disposición para ayudarte con tu salud cuando más lo necesites.

1

¿Cómo empezar?

Nuestro equipo de servicio al Cliente te llamará dentro de un periodo de dos días hábiles después de que hayas recibido tu(s) dispositivo(s). En esta llamada, te ayudaremos a conectar tu báscula de peso, tomar tu primera medición, y te explicaremos las funciones principales de la aplicación Medical Brain.

Los próximos pasos (del 2 al 11) te mostrarán el proceso necesario para conectar tu báscula de peso con el Medical Brain. Este proceso se debe hacer solo una vez y lo harás por teléfono con la ayuda de nuestro equipo.

2

Preparamos tu dispositivo y móvil para tomar tu primera medición.


Asegúrate de que Bluetooth esté activado en tu móvil.

Si está desactivado, ¿cómo lo enciendo?

- 1 Dirígete a la pantalla de inicio de tu móvil
- 2 Toca en el ícono "Configuración/Ajustes"
- 3 Busca  "Bluetooth" en la lista
- 4 Activa "Bluetooth" tocando el botón 

3


Coloca las pilas (incluidas) en la báscula de peso de peso

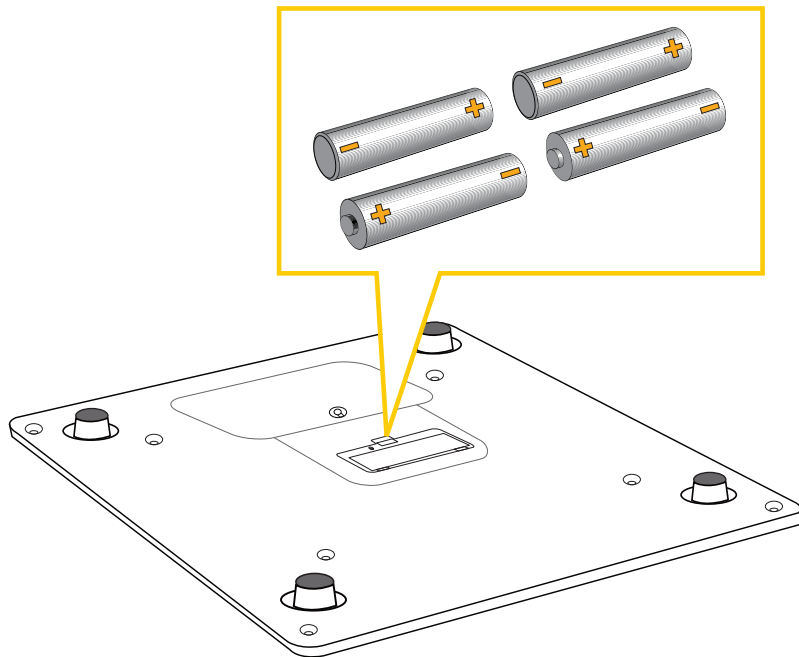

Coloca las pilas en la báscula de peso respetando las polaridades (+) y (-) de las pilas.

4


Ubica el botón "Set" en la parte posterior de tu báscula.

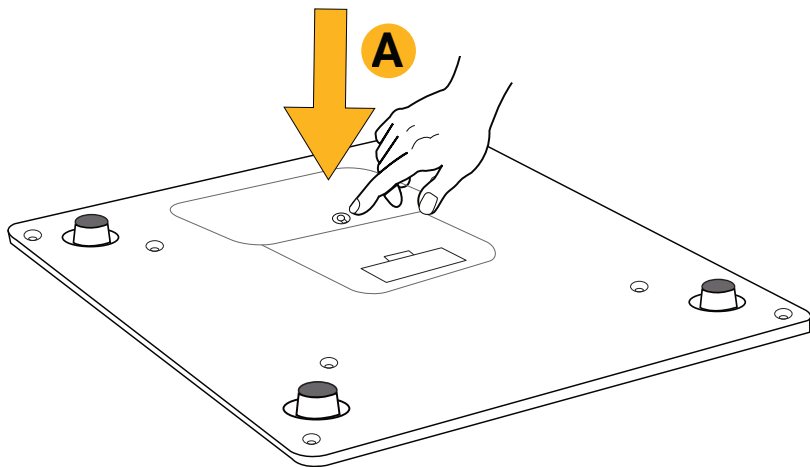

5

Mantén presionado el botón "Set" hasta que "Pr" aparece en la pantalla.

El proceso de enlace (conexión) ha comenzado una vez que tu báscula muestra "Set".

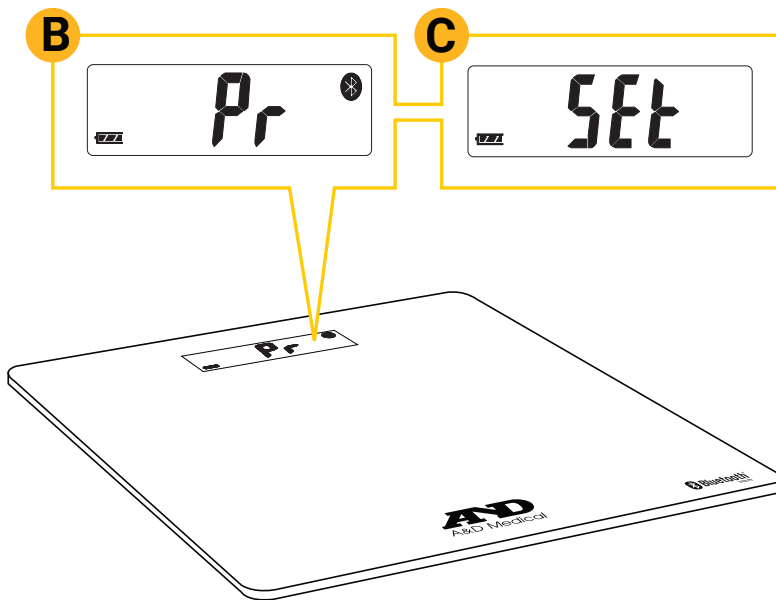

6

Otorga acceso

En este momento, tu báscula de peso se está conectando con tu móvil y la aplicación Medical Brain.

Para habilitar la conexión, por favor permite todas las solicitudes de Bluetooth, Ubicación y enlace (conexión).

Si no se permiten estos permisos, el enlace (conexión) no se podrá realizar.



7

¡Felicitaciones!

Tu báscula de peso ha sido reconocida.

Ahora vamos a tomar tu primera medición para completar el proceso de enlace (conexión).



Dispositivo reconocido


Tomemos una primera medición para completar el enlace entre tu dispositivo médico y el Medical Brain.

LISTO

8

Toma tu primera medición

Súbete a la báscula. Durante la medición verás en la pantalla una barra de progreso.

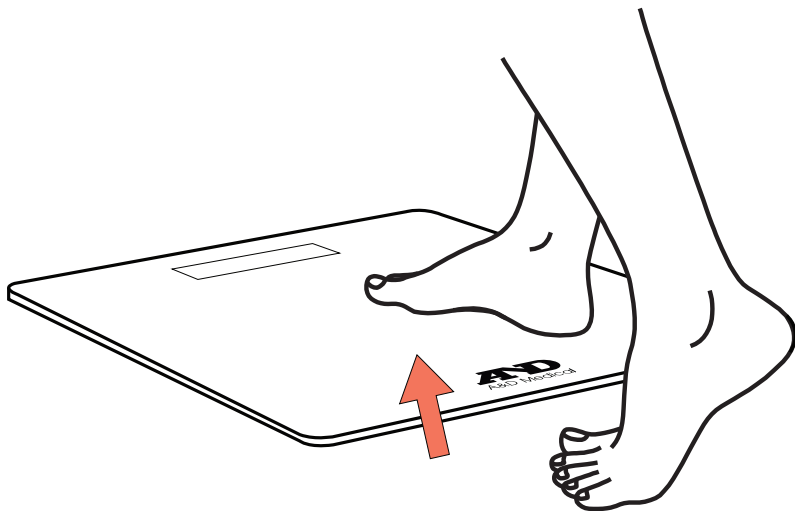


9

Bájate de la báscula


Bájate una vez que "STEP" y "OFF" se muestren alternativamente con 3 pitidos.

La medición que se muestra en la pantalla se envía automáticamente al Medical Brain.

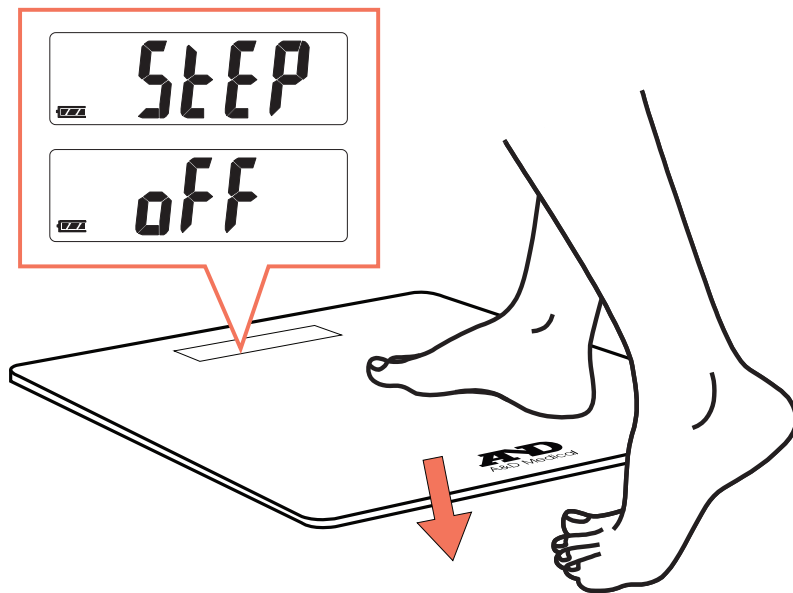

Ver la medición

- Medical Brain te mostrará tu primera medición.
- Toca el botón "Listo" para ver la medición en el chat.

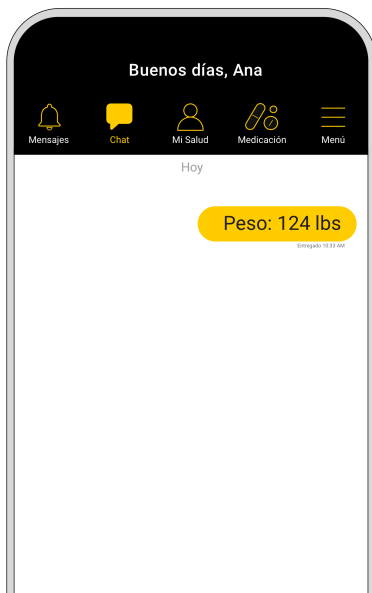

Felicitaciones

Tu primera medición es

Peso: 124 lbs

Para mediciones futuras:

Simplemente abre la aplicación, usa tu dispositivo y confirma tu medición cuando se te solicite

LISTO

Nota: Después del paso anterior, si recibiste más de un dispositivo, la aplicación te llevará a la pantalla "Parámetros" para enlazar (conectar) el siguiente dispositivo.

¿Cómo tomar mediciones regularmente?

Simplemente abre la aplicación Medical Brain, toma tu peso y confirma tu medición cuando Medical Brain te lo solicite.

La medición se mostrará en el chat y quedará registrada en tu historial para que tú y tu doctor puedan verla.


Medical Brain te ofrece muchas más funciones:


Habla (o escribe) al Medical Brain en cualquier momento. MB comprende con precisión tu estado clínico actual e identifica factores de riesgo facilitando una rápida intervención y tratamiento por parte de tu doctor. Puedes informar datos como:

- *Mis medicamentos me dan náuseas. ¿Qué debería hacer?*
- *Mi presión arterial es de 120/80*
- *Necesito renovar mi medicamento*
- *Me gustaría programar una cita con mi doctor*

Monitorea tus mediciones

Todas tus mediciones se guardarán y se mostrarán en la aplicación Medical Brain dentro de la pantalla "Mi Salud" > "Parámetros" > "Peso" > "Historial."

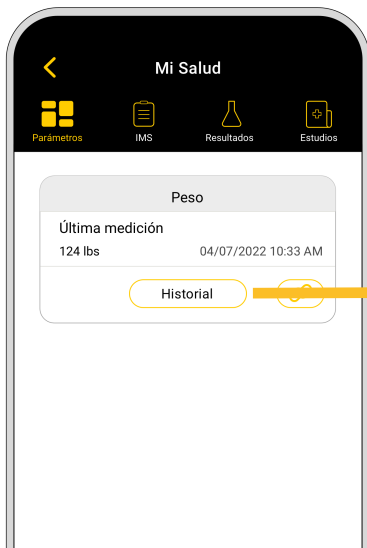

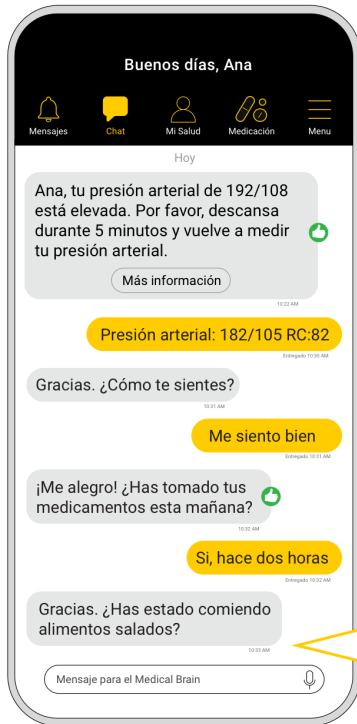

No. He estado limitando mi sal.

Entendido 10:34 AM

Gracias por hacérmelo saber. Tu presión arterial de 182/105 está elevada. Se recomienda evaluación de tu doctor.

10:35 AM

Dr. Smith ha sido notificado. Es posible que sea necesario ajustar tus medicamentos para la presión arterial.

10:35 AM

Dr. Smith quiere que tomes una dosis adicional de 5 mg de Amlodipine ahora y que aumentes tu dosis de Amlodipine a 10 mg diarios a partir de mañana.

Vuelve a tomar tu presión arterial en 2 horas para asegurarte de que tu presión arterial responda al medicamento.

Si desarrollas algún síntoma, como dolor de cabeza intenso, dolor en el pecho, dificultad para respirar, dirígete al departamento de emergencias para una evaluación.

10:45 AM

Gracias. Entendido. Tomaré ahora el Amlodipine.

Entendido 10:47 AM

Comunícate con Medical Brain via chat



Genera un resumen médico inteligente (IMS) con toda la información importante sobre tu historia clínica y tu estado de salud actual.



Según tu estado clínico, Medical Brain te ayudará a programar citas médicas, comunicarte con tu doctor, recibir respuestas a tus preguntas, controlar tus medicaciones diarias, pedir renovación de medicamentos, o derivaciones a especialistas.

<

Mi Salud

Parámetros

IMS

Resultados

Estudios

RESUMEN MÉDICO INTELIGENTE

PROBLEMAS AGUDOS

Hypertensive urgency		03/18/2021
----------------------	--	------------

PARÁMETROS IMPORTANTES

Blood Pressure	182/105	03/18/2021 10:30
Heart Rate	82	03/18/2021 10:30

RESULTADOS DE LABORATORIO Y
DIAGNÓSTICO RELEVANTES

Creatinine	0.89	02/10/2021
eGFR	65	02/10/2021
Potassium	4.4	02/10/2021
Ejection Fraction	62%	03/15/2020

DIAGNÓSTICO MÉDICO ACTUAL

Hypertension	Exist	06/10/2015
Hypercholesterolemia	Exist	06/10/2015
Coronary Artery Disease	Exist	01/23/2017

↑



Una vez disponibles, Medical Brain muestra tus resultados de laboratorio y diagnóstico, para que tú y tu doctor puedan verlos.



Comunícate en cualquier momento vía chat con mensaje de texto o audio. MB te entiende y conoce tu perfil de salud para brindarte una atención médica precisa y coordinada.



Mantiene tus comunicaciones y datos de manera segura y protegida.

The screenshot shows the 'Mi Salud' (My Health) section of the Medical Brain app. At the top, there are four icons: 'Parámetros' (Parameters), 'IMS', 'Resultados' (Results), and 'Estudios' (Studies). Below these, the 'Resultados' (Results) tab is selected, displaying a table of laboratory results for a CBC/DIFF test dated 02/10/2021 at 4:28 AM. The table has three columns: 'Estudio' (Study), 'Resultados' (Results), and 'Rango normal' (Normal Range). The results are as follows:

Estudio	Resultados	Rango normal
WBC COUNT	7.7	4.8-10.8
RBC COUNT	5.25	4.70-6.10
HEMOGLOBIN	15.3	14.0-18.0
HEMATOCRIT	47.1	42.0-52.0
MCV	89.7	80.0-94.0
MCH	29.1	27.0-31.0
MCHC	32.5	33.0-37.0
RDW	13.0	11.4-16.4
PLATELET COUNT	226	150-450
DIFF TYPE	AUTOMATED	
NEUTROPHILS-5P	84.3	37.9-70.5
LYMPHOCYTES-5P	6.7	19.8-47.7
MONOCYTES-5P	7.7	2.7-11.7
EOSINOPHILS-5P	0.3	0.3-5.9
BASOPHILS-5P	0.1	0.1-2.4
IMM GRANULOCYTE %	0.9	
ABS NEUTROPHILS	6.5	1.4-6.5

At the bottom right of the screen, there is a yellow circular button with an upward arrow icon, likely for sharing or saving the results.



medical brain®

**Tú y tu salud
son nuestra prioridad.**

Para hablar con nuestro equipo de Atención al Cliente,
por favor llama al (888) 355-0269